

CORONAVIRUS COVID-19

ANTIGEN 97

ANTIGEN TEST KIT COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Schnelltest

Schnelles und aussagekräftiges Instrument in der Akutdiagnostik

Patienten mit Verdacht auf COVID-19 können mit dem ANTIGEN Schnelltest innerhalb weniger Minuten ein Befundergebnis erhalten und das ohne Analysegerät bzw. Labor.

Der ANTIGEN Schnelltest eignet sich ebenso, um dezentrale Massentests durchzuführen, schnelle und aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, lokale Ausbreitungen festzustellen und Maßnahmen zur Eindämmung zu ergreifen.

Dieses Produkt wird zum qualitativen In-vitro-Nachweis des Antigens von SARS-CoV-2 im menschlichen Nasen- oder Rachenraum verwendet.



Vorteile

- schnelle und aussagekräftige Ergebnisse nach 15 min – anschließend Befundbesprechung ohne Folgetermin
- preiswerte und mobile Tests können überall durchgeführt werden
- Sensitivität: 97,10 % (positive Testung)
- Spezifität: 99,76 % (negative Testung)
- Entnahme von Nasen- oder Rachenabstrich
- kein Analysegerät und kein Labor erforderlich
- Test Kit enthält alle erforderlichen Verbrauchsmaterialien für die Auswertung
- Test für den professionellen Gebrauch
- gelistet beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) nach §1 Satz 1 vom 15.10.2020
- CE zertifiziert

Inhalt einer Packung

ANTIGEN Schnelltests (1, 20, und 40 Stück / Packung)

- steriler Abstrichtupfer für Rachenabstrich*
- Probenahmerohr mit Verschlusskappe und inkludiertem Extraktionspuffer
- Testkassette
- Einwegdruckbeutel für die Entsorgung
- Gebrauchsanweisung

* Tupfer für Nasenabstrich muss separat bestellt werden


Lagerbedingung:

- bei 4 – 30 °C

Haltbarkeit:

- 18 Monate

1. Probenahme (Nasen- oder Rachenabstrich)

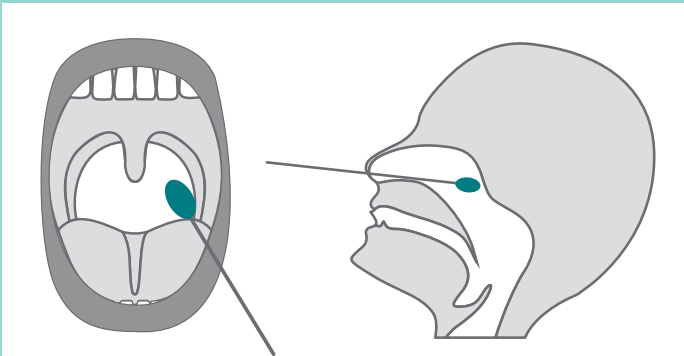


Die Probenahme erfolgt mit Hilfe eines sterilen Abstrichtupfers.

Rachenabstrich: Kopf leicht neigen, Mund offen halten und (Tupfer beinhaltet) "ah"sagen. Auf beiden Seiten der Rachenmandeln mindestens 3-mal abstreichen. Anschließend an der hinteren Rachenwand 3-mal auf und abstreichen.

Nasenabstrich: (Tupfer separat bestellen) Tupfer aus Nasenrachen langsam entfernen und dabei den Boden des Nasenkanals abstreichen.

2. Probebehandlung

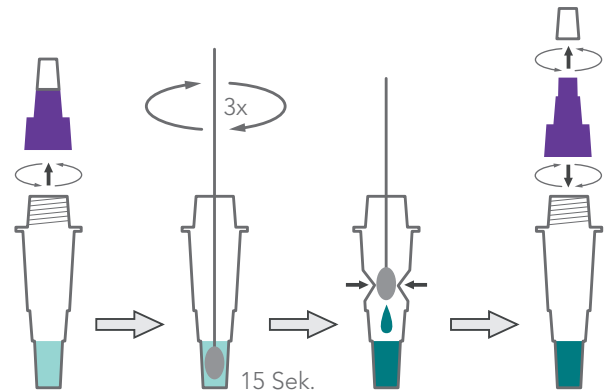

Der sterile Abstrichtupfer wird nach der Probenahme unterhalb des Flüssigkeitsspiegels des Probenahmerohres eingeweicht, 3-mal gedreht und gedrückt. Die Einweichzeit des Abstrichtupfers beträgt mindestens 15 Sekunden. Das Probenahmerohr wird zusammengedrückt, die Flüssigkeit abgestriffen während der Tupfer herausgenommen wird. Das Probenahmerohr wird anschließend mit der Verschlusskappe abgedichtet.

3. Testverfahren



4-5 Tropfen in die Testkassette (Raumtemperatur von 10-30°C) geben und Ergebnis innerhalb von 15-30 Minuten ablesen.

4. Interpretation der Ergebnisse



positives Ergebnis: Wenn sowohl die Qualitätskontrolllinie "C", als auch die Nachweislinie "T" erscheinen, ist eine SARS-CoV-2-Antigen Infektion nachgewiesen.

negatives Ergebnis: Qualitätskontrolle "C" wird angezeigt.

ungültiges Ergebnis: Wenn die Qualitätskontrolle "C" nicht angezeigt wird.

Jetzt bestellen

Dr. Grob Healthcare GmbH
Schumannstraße 27
60325 Frankfurt
www.dr-grob.com

Bestellnummer: ANTIGEN97
eMail: order@dr-grob.com
Tel: +49 (0) 69 / 505027 304